


Детски позиционер за GE CT системи

Инструкции за употреба

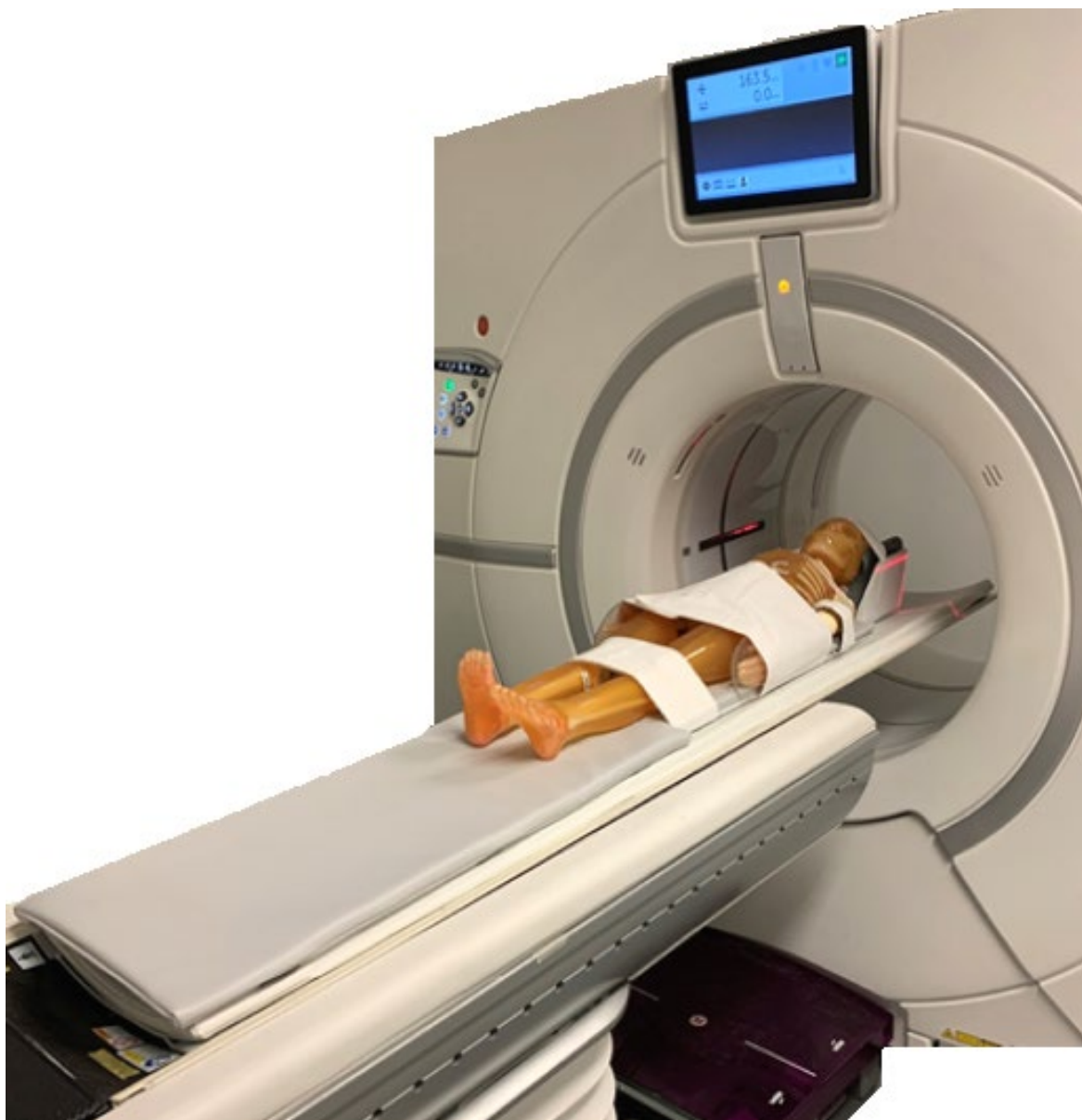

Важна информация

bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS

fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT

es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE

el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT

ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT

pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ZH-CN - E8003S GE CT 系統的儿童體位固定裝置

ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジショナ

zh - E8003S GE CT 系統的儿童体位固定裝置

hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom

cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT

da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer

nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen

et - E8003S Lapse positsioneerija GE CT-süsteemidele

fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten

mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT

hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez

ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너

lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām

lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms

no – E8003S Barneposisjoner for GE CT-systemer

pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE

pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE

ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT

ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT

sr - E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе

id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT

sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE

sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT

sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system

tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı

uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT

kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы

vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Произведено от:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 САЩ
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Не е направен с
естествен каучуков
латекс




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Малта



ВНИМАНИЕ:

Този продукт може да ви изложи на въздействието на химикали, за които е известно на щата Калифорния, че причиняват увреждане на репродуктивните функции. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov. 1-метил-2-пиролидон (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; триксилилфосфат (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8

Компоненти

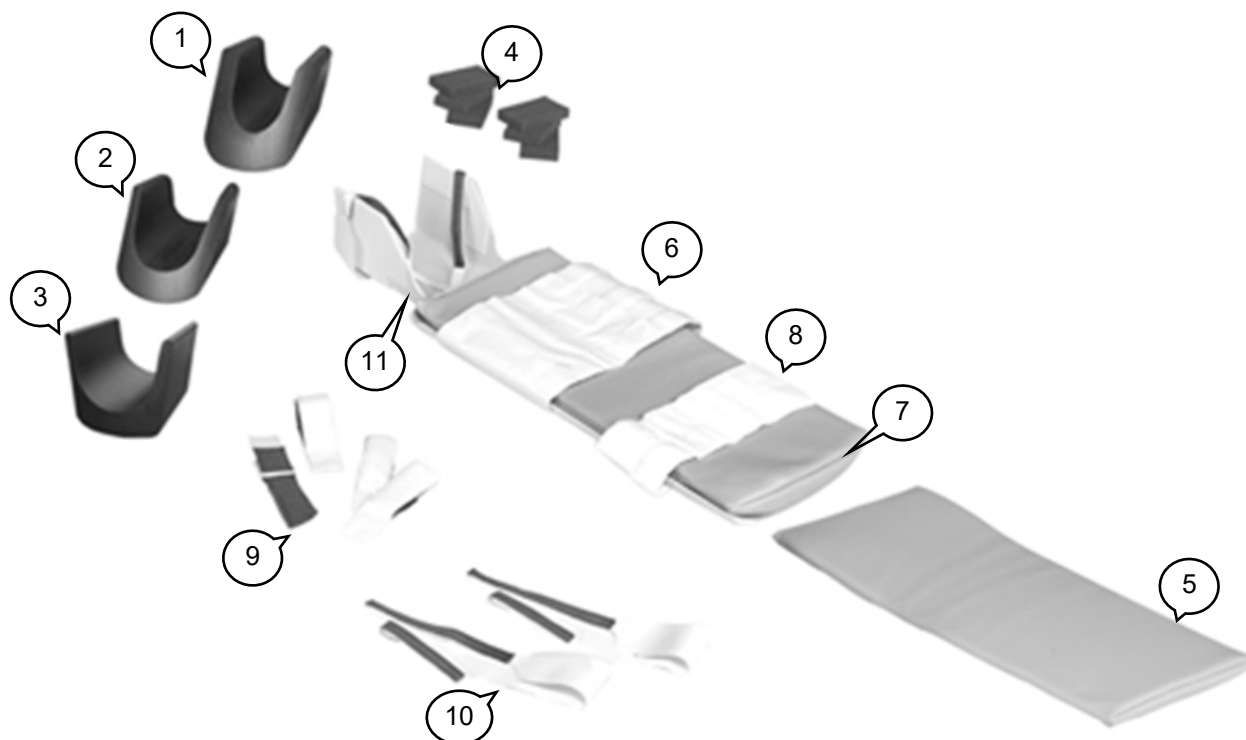

Item	Part Number	Description
1	28024	E8005AN MR/NUC Вложка за глава на дете, голяма
2	28025	E8005AM MR/NUC Вложка за глава на дете, средна
3	28026	E8005AL Вложка за глава на дете MR/NUC, малка
4	20603	E8003DG Блок от пяна
5	28060	E8005BD Подложка, удължител
6	23802	E8005AG Каишка за тяло на детски позиционер, широка
7	28057	E8005AJ Подложка за детски позиционер
8	28058	E8005AH Каишка за тяло на детски позиционер - тясна
9	26940	E8005BA Ремъци за китките на детски позиционер
10	23531	E8002BB Ремъци за глава на детски позиционер
11	21540	E8005AK Люлка за детски позиционер

Забележка: Всеки сериозен инцидент, свързан с употребата на изделието, трябва да се докладва на производителя и на здравния орган/компетентния орган, където е инсталирано изделието.



Внимание! Бордът за пациента трябва да е стабилен преди натоварването на пациента, за да се предотврати падането му.



Внимание! Преди започване на процедурата пациентът трябва да бъде подходящо закрепен в позиционионера, а позиционионера трябва да бъде закрепен към масата с ремъци, за да се предотврати падането на пациента.


Настройвам






Внимание! Не позиционирайте анатомия, която представлява интерес върху пресечни точки.



Позиционерът трябва да е разположен на около ~12 инча или ~30,5 см от края на масата, така че да няма смущения от планката на удължителя на масата.

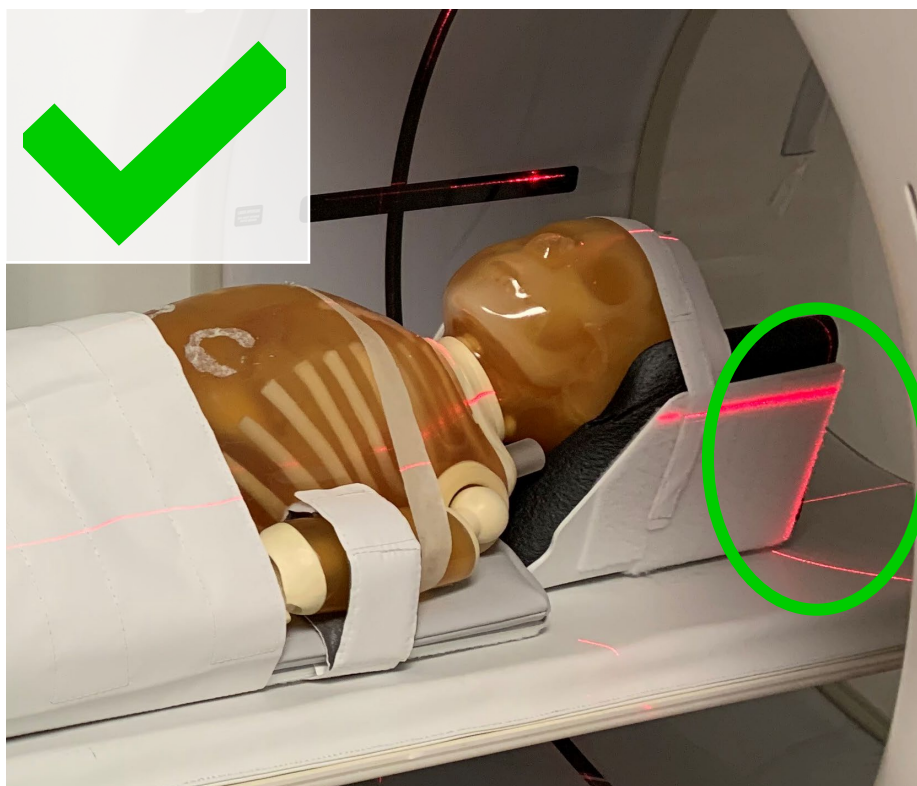

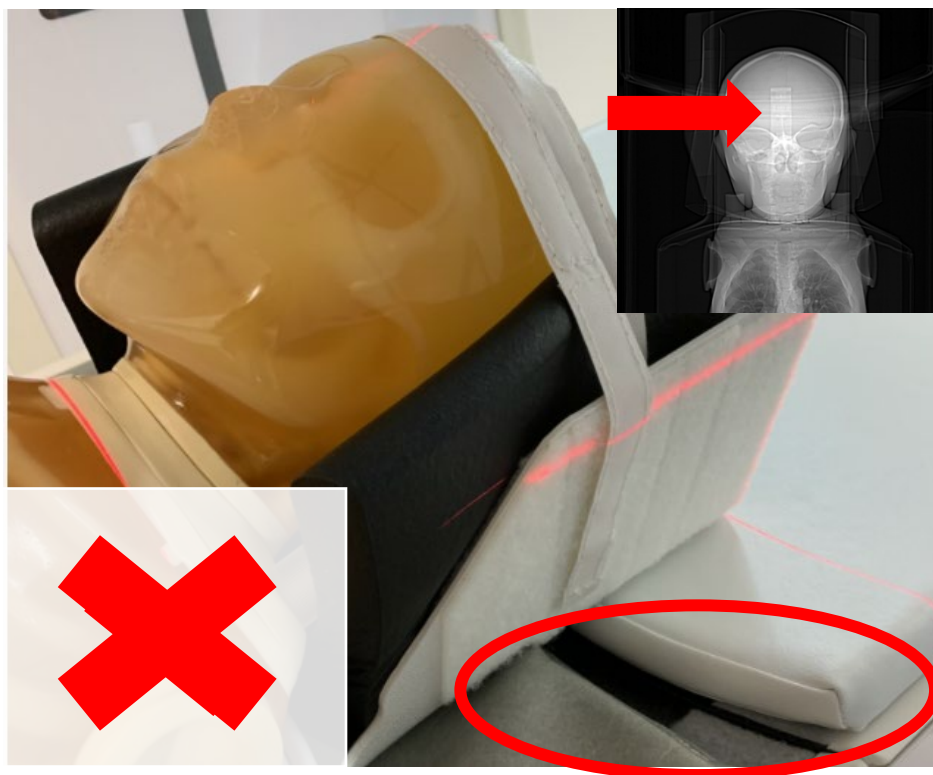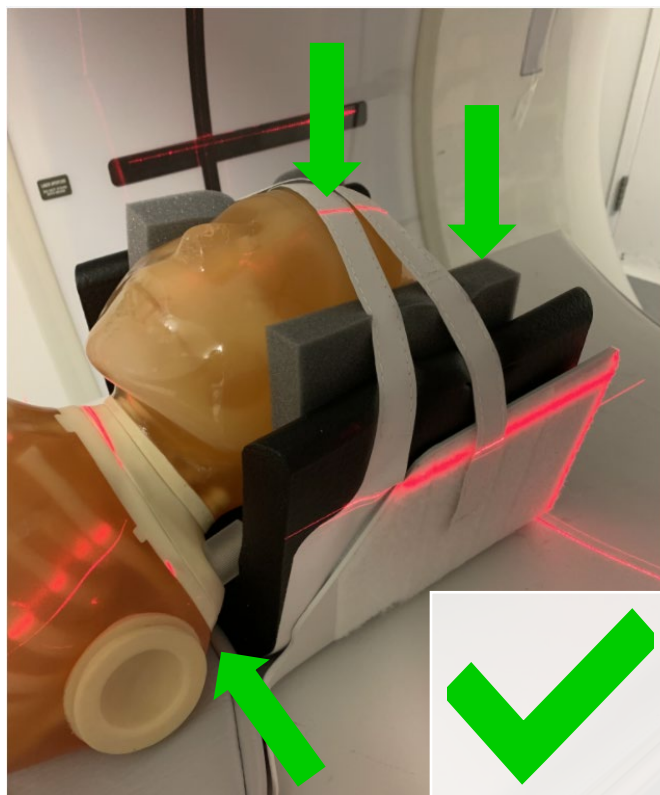

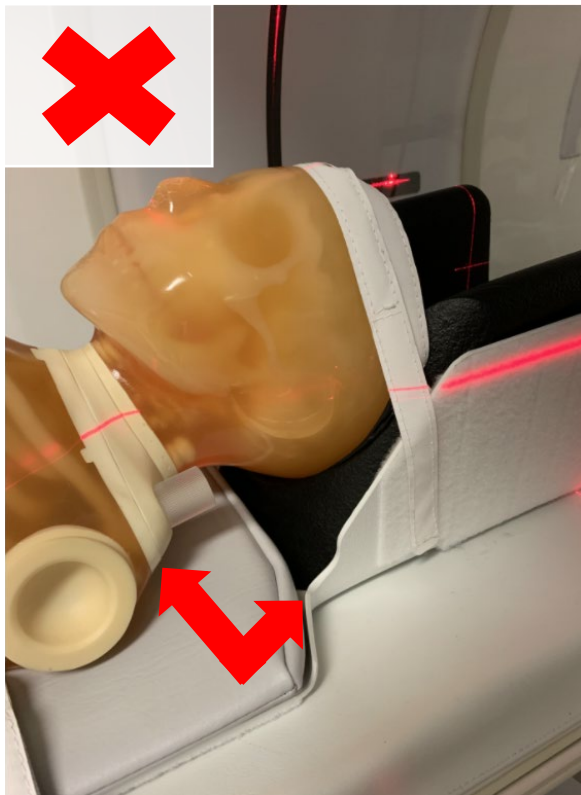

Почистване и дезинфекция

Почистете, като отстраните замърсяването, и дезинфекцирайте съгласно инструкциите на производителя/в съответствие с местните практики за почистване на околната среда в обекта, като използвате:

- Обикновена домашна белина - разредена 10:1 (минимално време за дезинфекция 5 минути)
- Бели кърпички Sani-Cloth® от PDI
- Бели бактерицидни кърпички от Clorox Healthcare®
- Спрей за почистване с белина от Clorox Healthcare®
- Почистващи дезинфекциращи кърпички с водороден пероксид от Clorox Healthcare®
- Почистващ препарат за различни повърхности с белина на Clorox®
- Разтвор за бактерицидно избелване Micro-Kill Bleach от Medline
- Кърпички за бактерицидно избелване Micro-Kill Bleach от Medline



Предупреждение! ВИНАГИ изплаквайте продуктите с чиста вода, за да отстраните остатъците от почистващия/дезинфекциращия разтвор. Ако не го направите, това може да доведе до нараняване на пациента.