


Kinderpositionierer für GE CT-Systeme Bedienungsanleitung für den Einsatz

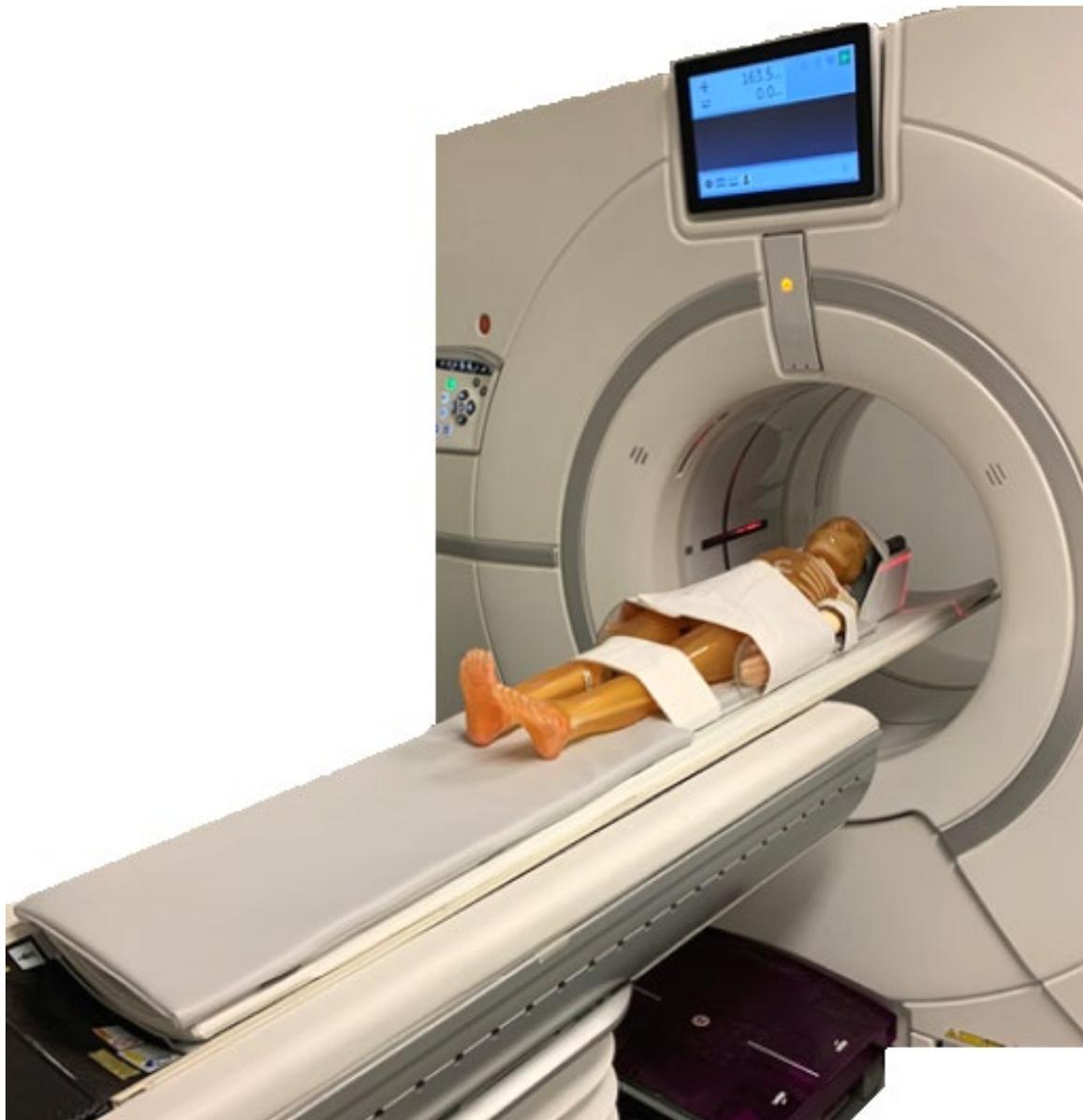

Wichtige Informationen

de - E8003S Kinderpositionierer für GE CT-Systeme

en – E8003S CHILD POSITIONER FOR GE CT SYSTEMS
fr - E8003S Positionneur pour enfant pour systèmes CT de GE
it - E8003S Posizionatore da bambino per sistemi GE CT
es - E8003S Posicionador infantil para sistemas de tomografía computada GE
el – E8003S Τοποθετητής παιδιού για συστήματα αξονικού τομογράφου GE CT
ga – E8003S Socraitheoir Páiste do Chórais GE CT
pt-BR - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ZH-CN - E8003S GE CT 系統的兒童體位固定裝置
ja - E8003S GE CTシステム用チャイルドポジションナ
bg - E8003S Детски позиционер за GE CT системи
zh - E8003S GE CT 系统的儿童体位固定装置
hr - E8003S Dječja kolijevka za uporabu sa GE CT sustavom
cs - E8003S Pediatrická Kolébka Kit pro systémy GE CT
da - E8003S Positioneringsenhed til børn til GE CT Systemer
nl - E8003S Child Positioner voor GE CT Systemen
et - E8003S Lapse positsioneerija GE KT-süsteemidele
fi - E8003S Lasten asetin GE TT -järjestelmiä varten
mt – E8003S Pożizzjonatur tat-Tfal għal Sistemi GE CT
hu - E8003S Gyermek teströgzítő szett GE CT rendszerekhez
ko – E8003S GE CT 시스템 용 차일드 포지셔너
lv - E8003S Bērnu fiksators GE CT sistēmām
lt - E8003S Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas „GE“ KT sistemoms
no – E8003S Barneposisjonering for GE CT-systemer
pl - E8003S Pozycjoner pediatryczny do systemów TK firmy GE
pt - E8003S posicionamento para crianças para utilização nos sistemas de TC da GE
ro - E8003S Pozitie pentru copii pentru sistemele GE CT
ru - E8003S Детский позиционер для систем GE CT
sr - E8003S Дечји позиционер за GE ЦТ системе
id - E8003S Positioner Anak untuk Sistem GE CT
sk - E8003S Detský polohovateľ pre CT systémy GE
sl - E8003S Komplet za nsramestitev otroka v GE CT
sv - E8003S Barnfixering för GE CT-system
tr - E8003S GE CT Sistemleri için Çocuk Konumlandırıcı
uk - E8003S Дитячий позиционер для систем GE CT
kk – E8003S GE CT жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткіш жиынтықтамасы
vi – E8003S Thiết bị Cố định Trẻ em cho Hệ thống GE CT



Hergestellt von:

Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 USA
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Nicht hergestellt
mit
Naturkautschuk-
Latex




Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



VORSICHT:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, von denen dem Staat Kalifornien bekannt ist, dass sie die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.1-methyl-2-pyrroildone . (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1

Komponenten

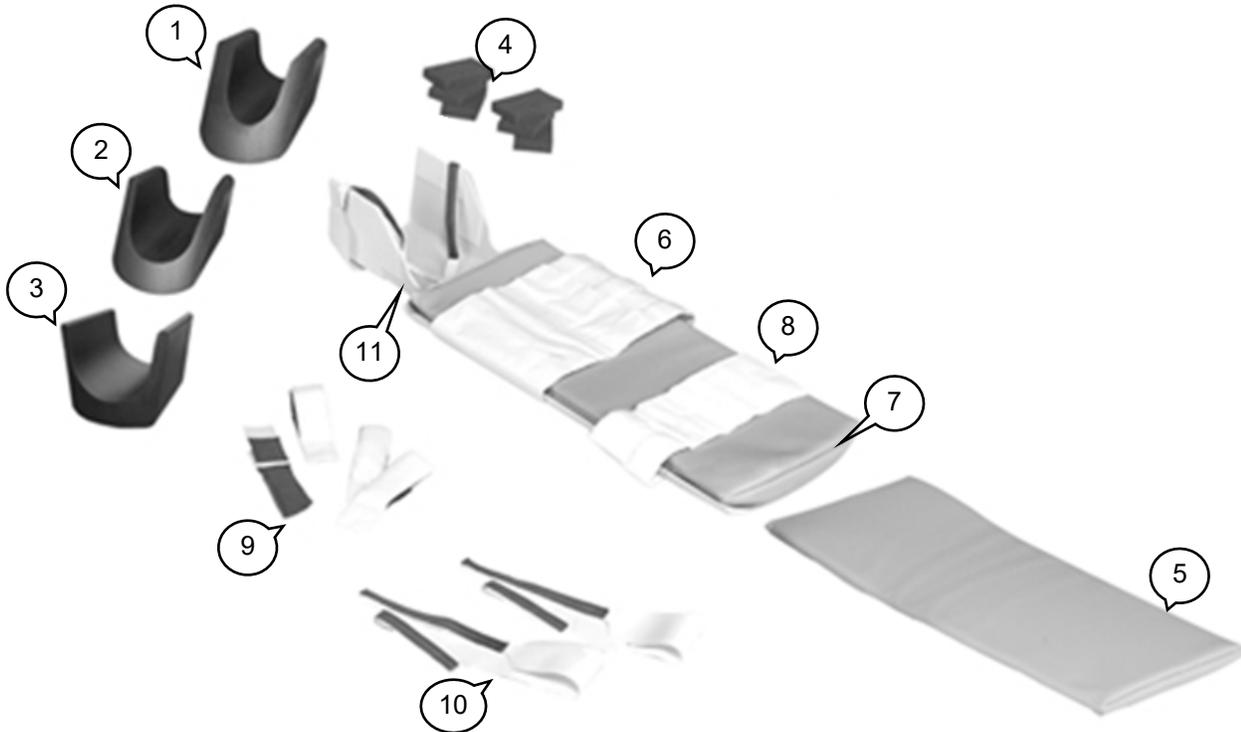

Artikel	Teilenummer	Beschreibung
1	28024	E8003SA CT Kinderkopfkissen - Klein
2	28025	E8003SB CT Kinderkopfkissen - Medium
3	28026	E8003SC CT-Kinderkopfkissen - Groß
4	20603	E8003DG Schaumstoffblock
5	28060	E8005BD Polster, Verlängerung
6	23802	E8005AG Körpergurt für Kinderpositionierer, breit
7	28057	E8005AJ Polster für Kinderlagerungshilfe
8	28058	E8005AH Körpergurt für Kinderpositionierer - schmal
9	26940	E8005BA Handgelenksgurte für Kinderpositionierer
10	23531	E8002BB Kopfgurte für Kinderpositionierer
11	21540	E8005AK Halterung für Kinderlagerungshilfe

Hinweis: Jeder schwerwiegende Zwischenfall im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts sollte dem Hersteller und der Gesundheitsbehörde/zuständigen Behörde, bei der das Gerät installiert ist, gemeldet werden.



Warnung! Patientenbrett muss vor dem Beladen des Patienten stabil sein, um einen Sturz des Patienten zu verhindern.



Warnung! Vor Beginn des Verfahrens muss der Patient in der Positionierhilfe entsprechend gesichert werden, und die Positionierhilfe muss mit Gurten am Tisch befestigt werden, um ein Herunterfallen des Patienten zu verhindern.


Einrichtung






Warnung! Platzieren Sie den zu untersuchenden Körperteil nicht über Verbindungsstellen.



Der Positionierer sollte ca. 30,5 cm vom Ende des Tisches entfernt sein, damit es keine Störung durch die Arretierung des Tischverlängerers gibt.

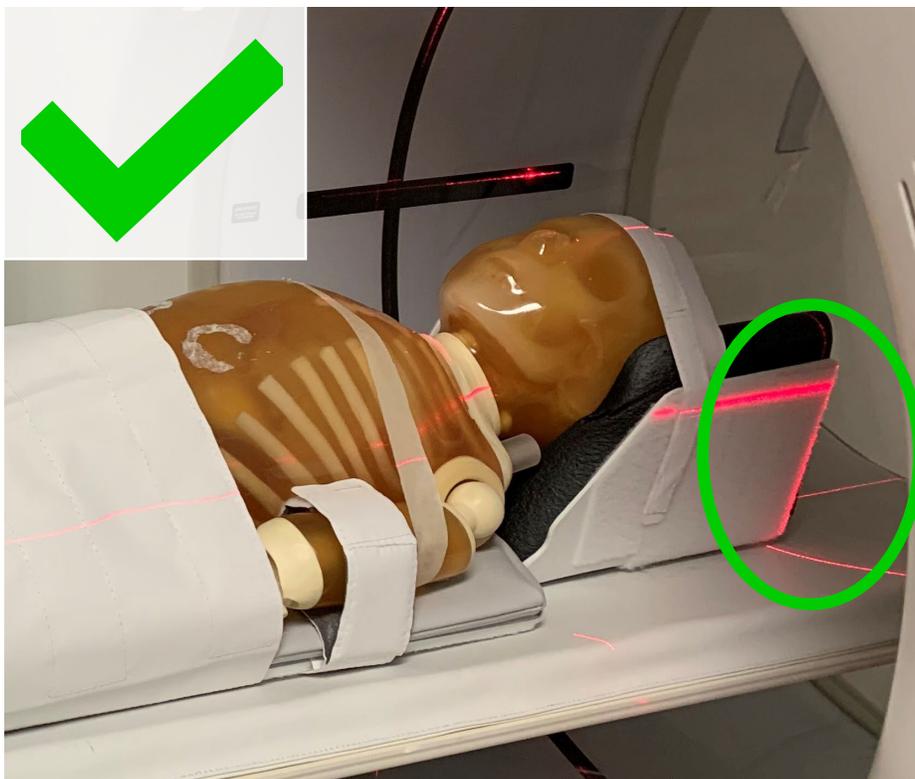

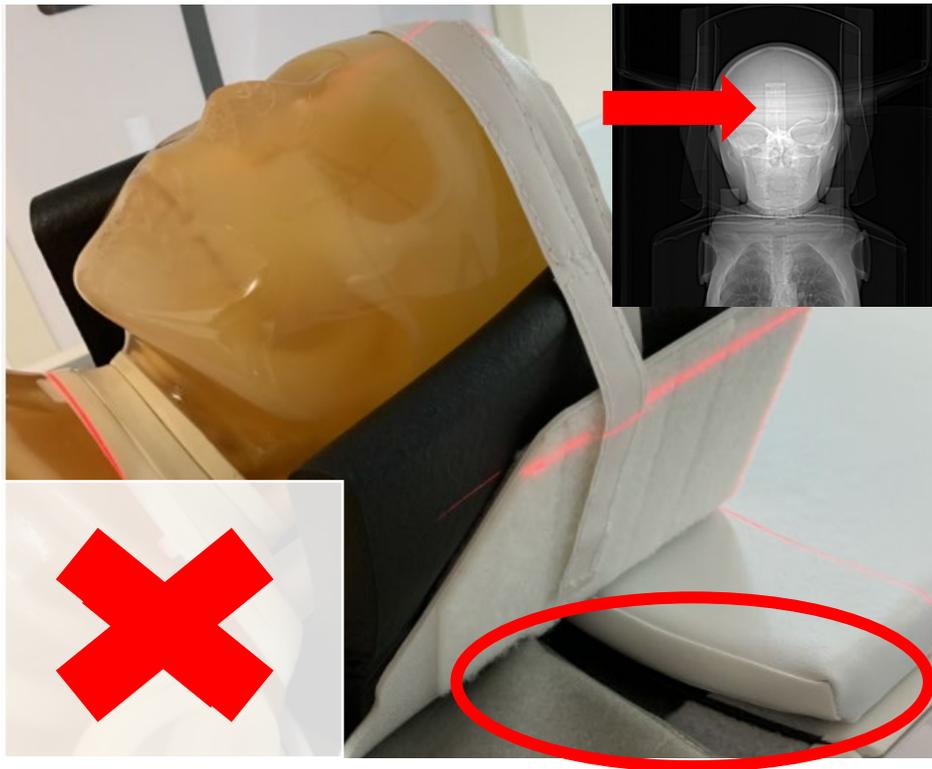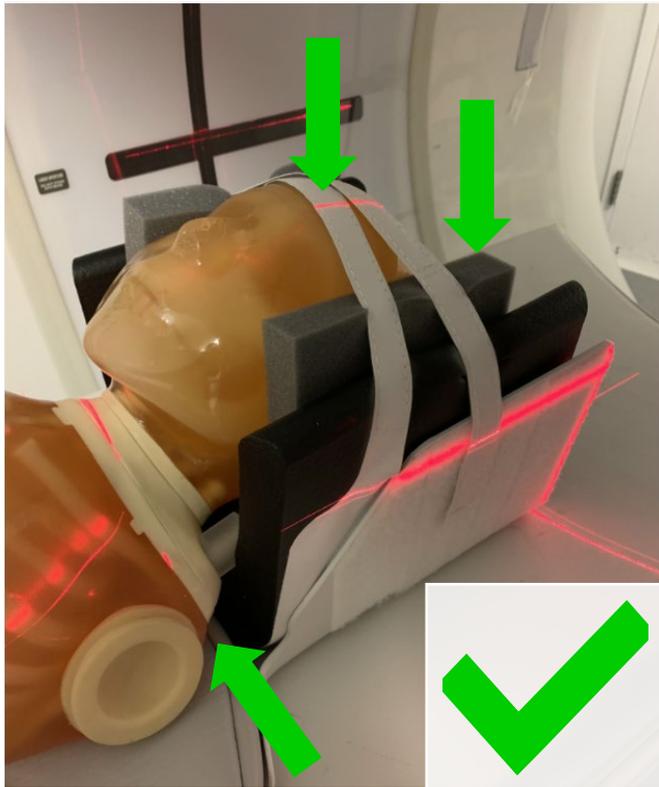

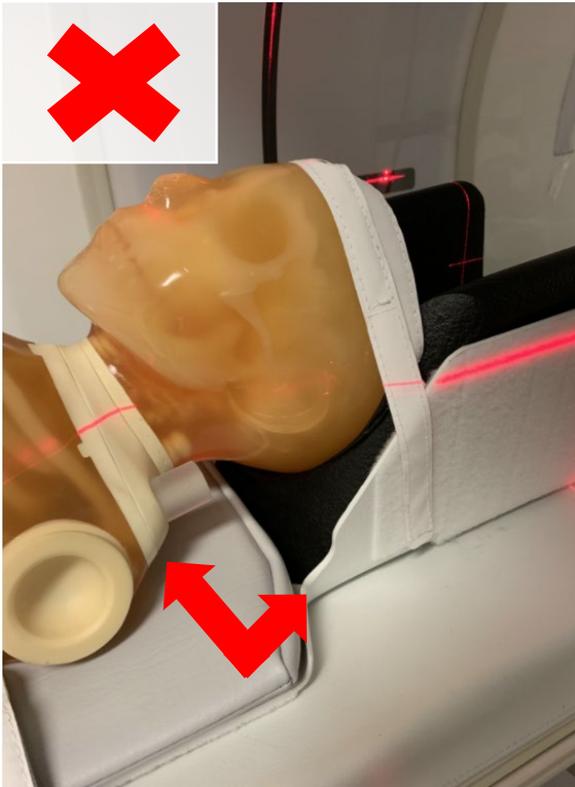

Reinigung und Desinfektion

Reinigen Sie durch Entfernen von Schmutz und desinfizieren Sie gemäß den Anweisungen des Herstellers/entsprechend den örtlichen Reinigungspraktiken der Einrichtung mit:

- Haushaltsübliches Bleichmittel - 10:1 verdünnt (5 Minuten Mindestdesinfektionszeit)
- Sani-Cloth® Bleichtücher von PDI
- Bleichmittel-Keimtötungstücher von Clorox Healthcare®- keimtötender Bleichmittel-Reiniger-Spray von Clorox Healthcare®
- Wasserstoffperoxid-Reiniger Desinfektionstücher von Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi-Oberflächenreiniger mit Bleichmittel
- Keimtötende Bleichmittel-Sprays von Clorox Healthcare®
- Wasserstoffperoxid-Reiniger Desinfektionstücher von Clorox Healthcare®
- Clorox® Multi-Oberflächenreiniger mit Bleichmittel
- Micro-Kill Bleichmittel keimtötende Bleichlösung von Medline
- Micro-Kill Bleichmittel keimtötende Bleichtücher von Medline



Warnung! Spülen Sie Produkte IMMER mit klarem Wasser ab, um Rückstände der Reinigungs-/Desinfektionslösung zu entfernen. Eine Nichtbeachtung kann zu Verletzungen des Patienten führen.