


Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer Инструкции за употреба

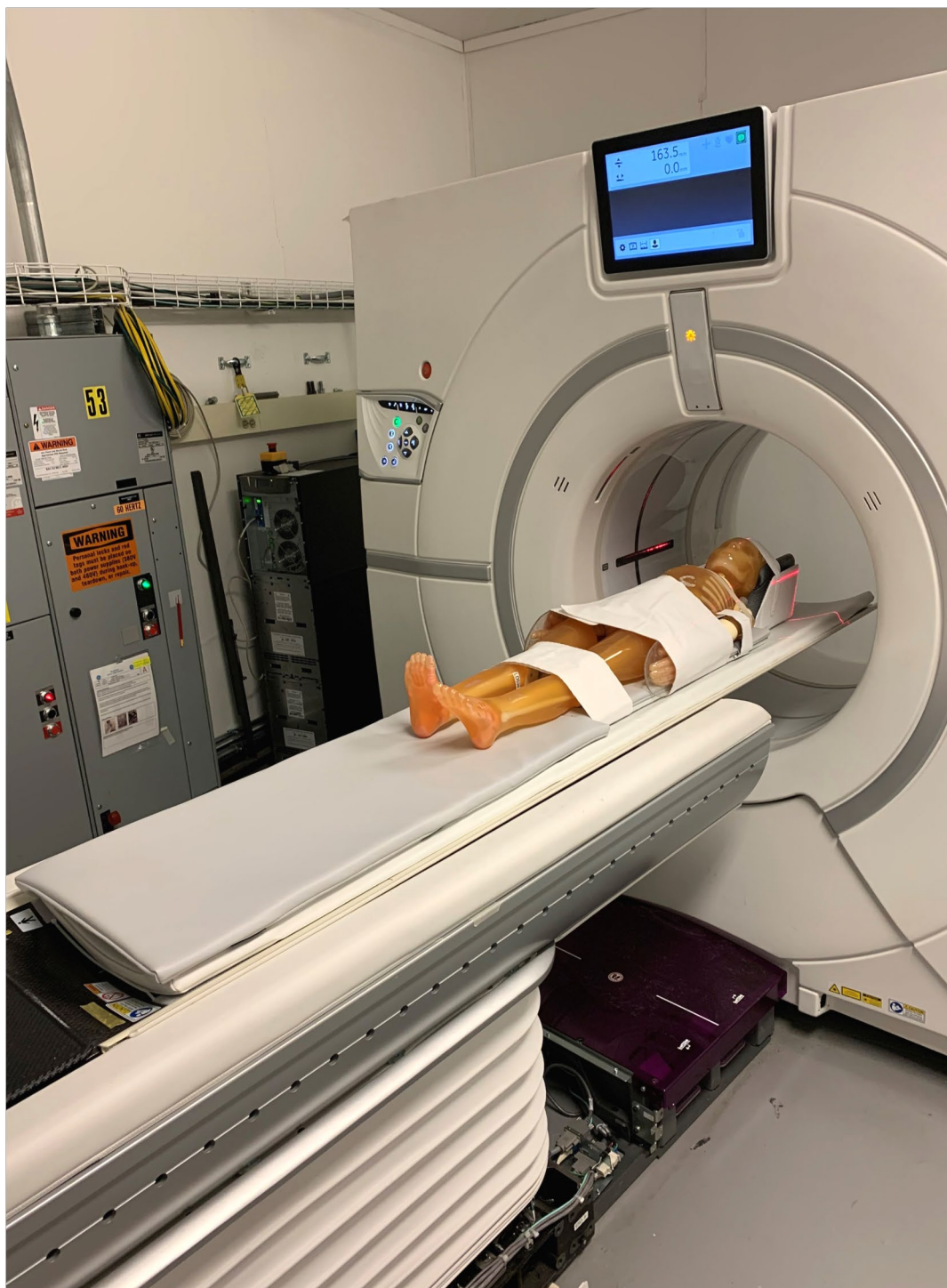

28634-303-000 Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer

Инструкции за употреба

Дата на издаване 07JUL2021

Страница 1 от 8

bg - E8823MR Детски позиционер

За използване със системи: Premier, Voyager, Explorer

en - E8823MR Child Positioner For Use With Systems: Premier, Voyager, Explorer
fr - E8823MR Positionneur pour enfant pour systèmes : Premier, Voyager, Explorer
de - E8823MR Kinderpositionierer zur Verwendung mit Systemen: Premier, Voyager, Explorer
it - E8823MR Posizionatore da bambino per l'uso con i sistemi: Premier, Voyager, Explorer
es - E8823MR Posicionador infantil para usar con los sistemas: Premier, Voyager, Explorer
el - E8823MR Τοποθετητής παιδιού για χρήση με τα συστήματα: Premier, Voyager, Explorer
ga - E8823MR Socraitheoir Páiste le húsáid in éineacht le Córais: Premier, Voyager, Explorer
pt-BR - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ZH - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
ja - E8823MR Premier、Voyager、Explorerシステム対応 チャイルドポジショナー
zh - E8823MR 兒童體位固定裝置 - 適用系統 : Premier、Voyager、Explorer
hr - E8823MR Dječja kolijevka za uporabu sa sustavima: Premier, Voyager, Explorer
cs - E8823MR Dětská kolébka Kit Pro použití se systémy: Premier, Voyager, Explorer
da - E8823MR Positioneringsenhed til børn til systemerne: Premier, Voyager, Explorer
nl - Child Positioner voor gebruik met: Premier, Voyager, Explorer systemen
et - Lapse positsioneerija süsteemidele Premier, Voyager, Explorer
fi - E8823MR Lasten asetin käytettäväksi seuraavien järjestelmien kanssa: Premier, Voyager, Explorer
mt - E8823MR Pożizzjonatur tat-Tfal biex jintuża mas-Sistemi: Premier, Voyager, Explorer
hu - E8823MR Gyermekek test rögzítő, amely az alábbi rendszerekkel használható: Premier, Voyager, Explorer
ko - E8823MR 자식 포지셔너시스템과 함께 사용하기 위해: Premier, Voyager, Explorer
lv - E8823MR Bērnu fiksators lietošanai ar sistēmām: Premier, Voyager, Explorer
lt - E8823MR Vaiko padėties nustatymo įtaisas, skirtas naudoti su sistemomis „Premier“, „Voyager“, „Explorer“
no - E8823MR Underordnet stillingsstiller For bruk med systemer: Premier, Voyager, Explorer
pl - E8823MR Pozycjoner pediatryczny do użytku z systemami: Premier, Voyager, Explorer
pt - E8823MR Kit de posicionamento para crianças para utilização com os sistemas: Premier, Voyager, Explorer
ro - E8823MR Kit de leagăn pediatric pentru utilizare cu sisteme: Premier, Voyager, Explorer
ru - E8823MR Детский позиционер Для использования с системами: Premier, Voyager, Explorer
sr - E8823MR Дечији позиционер За употребу са системима: Premier, Voyager, Explorer
id - E8823MR Posisi anak Untuk Digunakan dengan Sistem: Premier, Voyager, Explorer
sk - E8823MR Detský polohovateľ na použitie so systémami: Premiér, Voyager, Explorer
sl - E8823MR Komplet za namestitvev otroka v sistemih: Premier, Voyager, Explorer
sv - E8823MR Barnfixering för användning med systemen: Premier, Voyager, Explorer
tr - E8823MR Alt konumlayıcı Sistemlerle Kullanım İçin: Premier, Voyager, Explorer
uk - E8823MR Дочірній позиціонер Для використання з системами: Premier, Voyager, Explorer
kk - E8823MR Premier, Voyager, Explorer жүйелерінде пайдаланылатын баланы бекіткішті пайдалану жөніндегі нұсқаулық
vi - E8823MR Thiết bị Cố định Trẻ em để sử dụng với các Hệ thống: Premier, Voyager, Explorer



**Произведен от:**
Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430 САЩ
810-750-5300
DomicoMed.com



DomicoMed.com/eifu



Не е направен с
естествен каучуков
латекс



Advena Ltd., Tower Business Centre, 2nd Flr.,
Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



ВНИМАНИЕ:

Този продукт може да ви изложи на въздействието на химикали, за които е известно на щата Калифорния, че причиняват увреждане на репродуктивните функции. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov. 1-метил-2-пиролідон (NMP) CAS: 872-50-4, EC: 212-828-1; триксилилфосфат (TXP) CAS: 25155-23-1, EC: 246-677-8


28634-303-000 Детски позиционер за използване със системи: Premier, Voyager, Explorer

Инструкции за употреба

Дата на издаване 07JUL2021

Страница 2 от 8

Компоненти

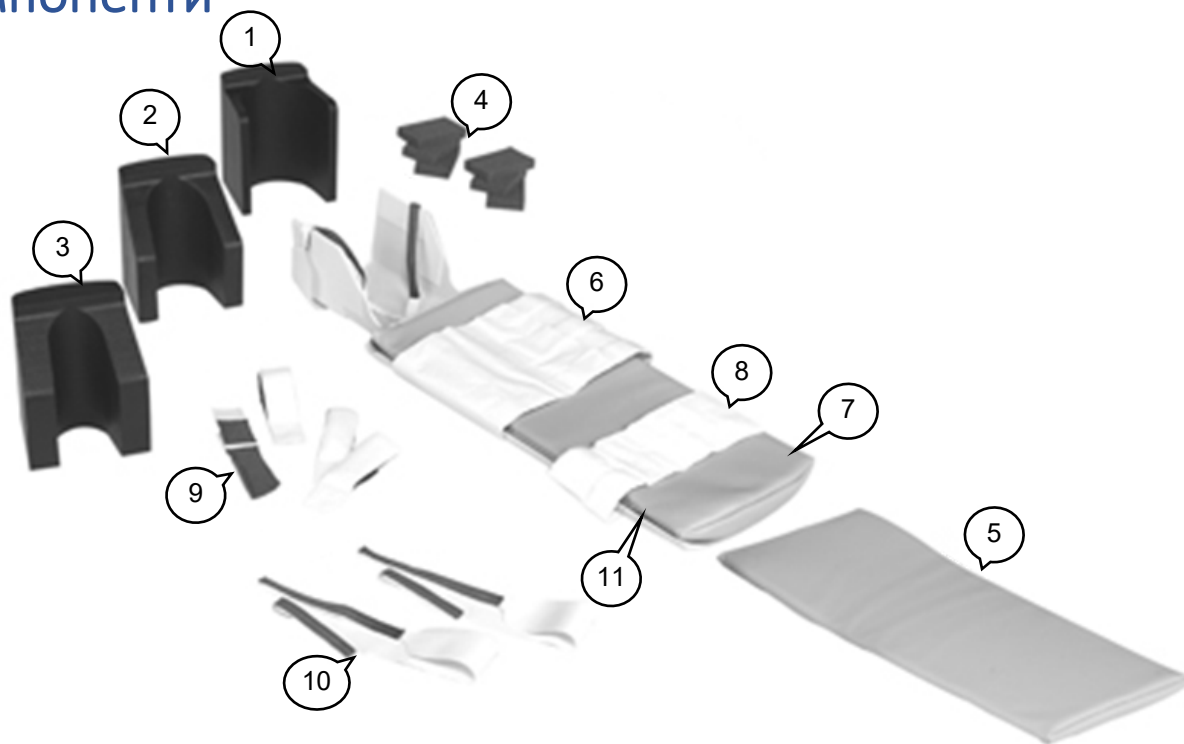

Елемент	Номер на част	Описание
1	21349	E8005AN MR/NUC Вложка за глава на дете, голяма
2	21350	E8005AM MR/NUC Вложка за глава на дете, средна
3	21351	E8005AL Вложка за глава на дете MR/NUC, малка
4	20603	E8003DG Блок от пяна
5	28060	E8005BD Подложка, удължител
6	23802	E8005AG Каишка за тяло на детски позиционер, широка
7	28057	E8005AJ Подложка за детски позиционер
8	28058	E8005AH Каишка за тяло на детски позиционер - тясна
9	26940	E8005BA Ремъци за китките на детски позиционер
10	23531	E8002BV Ремъци за глава на детски позиционер
11	21540	E8005AK Люлка за детски позиционер

Забележка: Всеки сериозен инцидент, свързан с употребата на изделието, трябва да се докладва на производителя и на здравния орган/компетентния орган, където е инсталирано изделието.




Внимание! Бордът за пациента трябва да е стабилен преди натоварването на пациента, за да се предотврати падането му.



Внимание! Преди започване на процедурата пациентът трябва да бъде подходящо закрепен в позиционионера, а позиционионера трябва да бъде закрепен към масата с ремъци, за да се предотврати падането на пациента.


Настройка


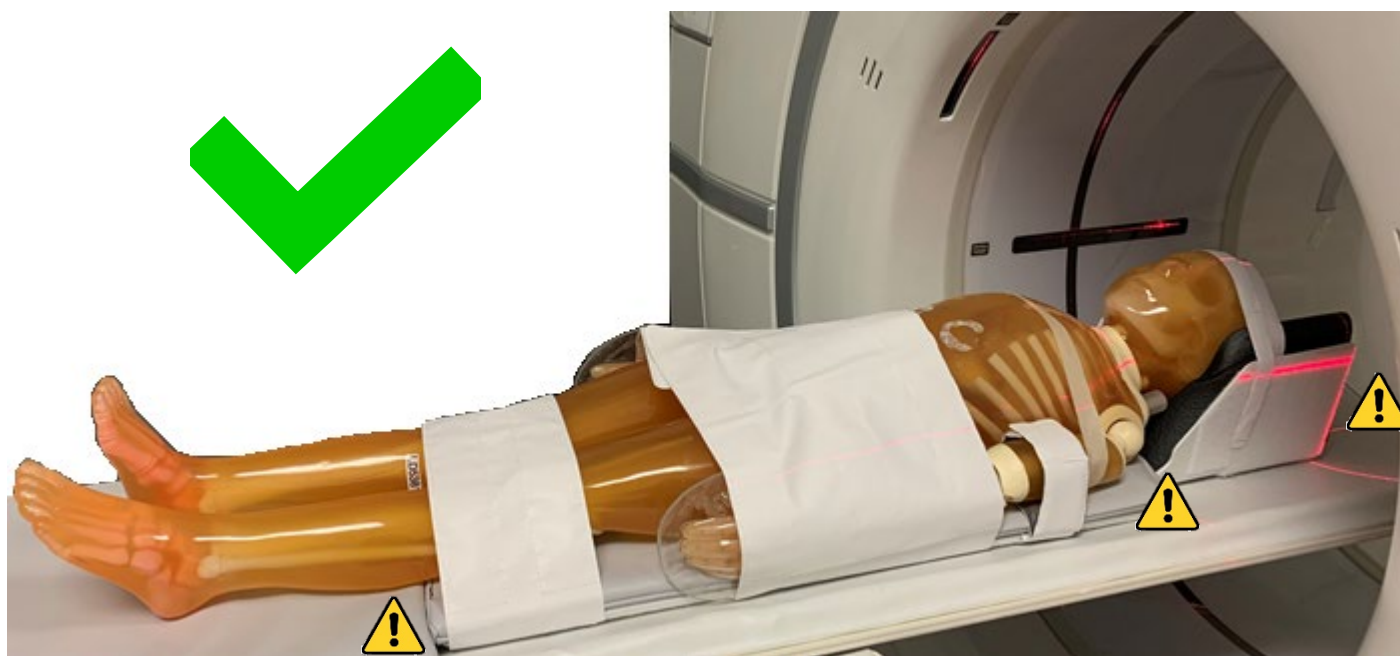



Внимание! Не позиционирайте анатомия, която представлява интерес върху пресечни точки.



Позиционерът трябва да е разположен на около ~12 инча или ~30,5 см от края на масата, така че да няма смущения от планката на удължителя на масата.

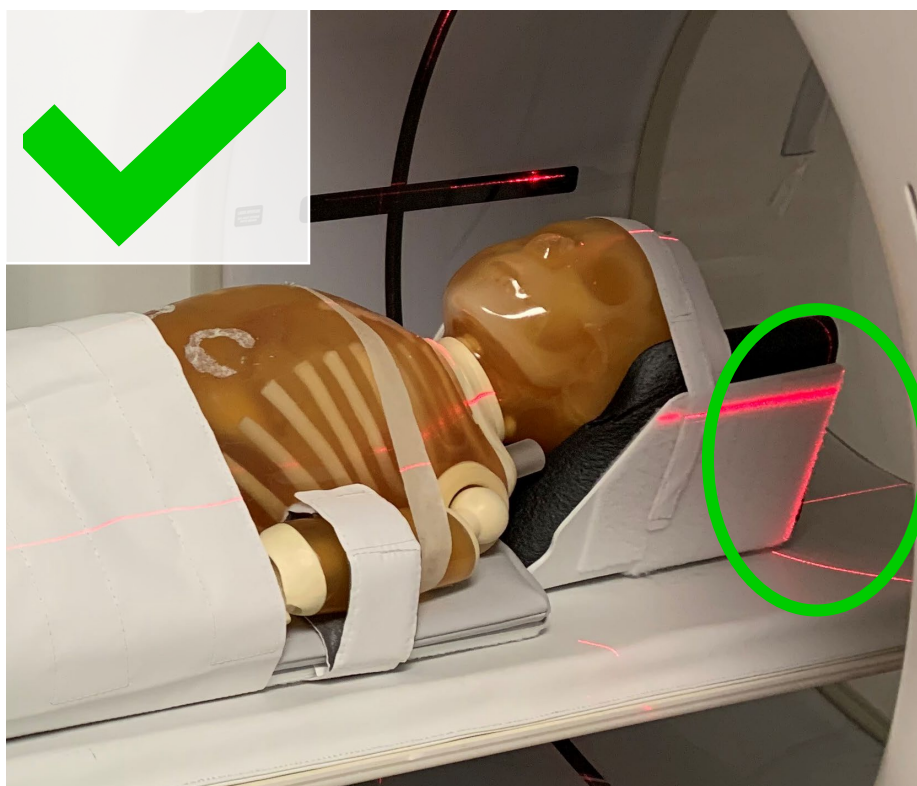

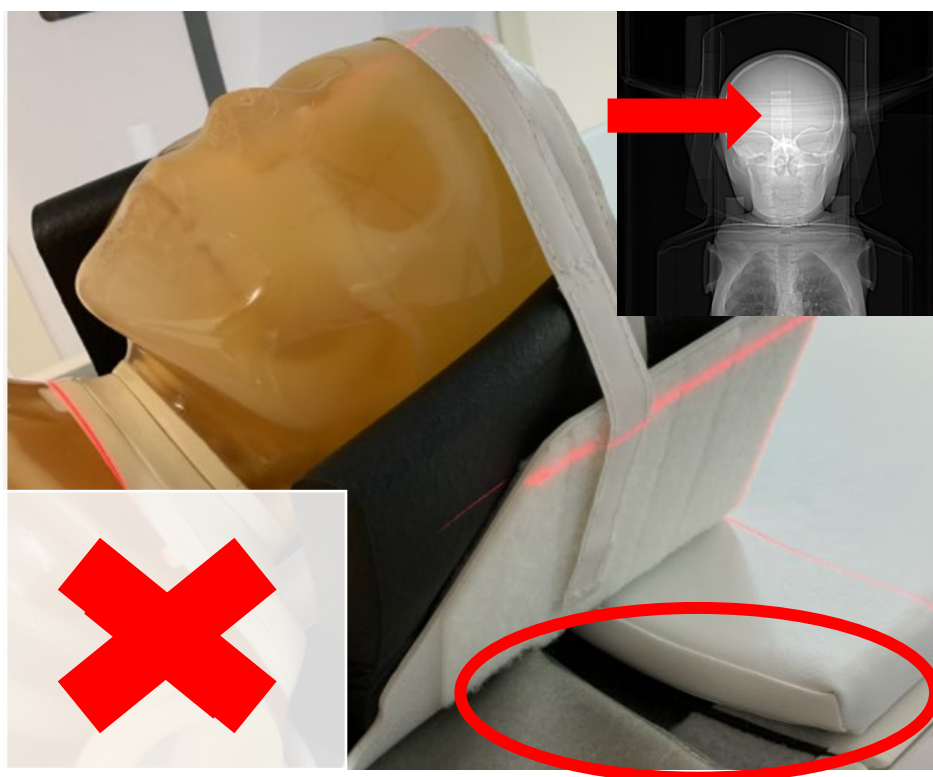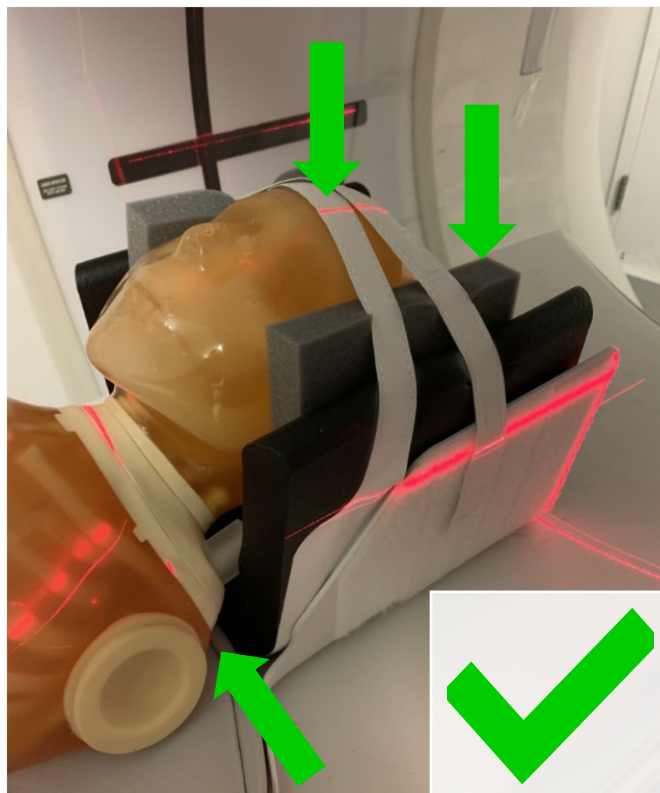

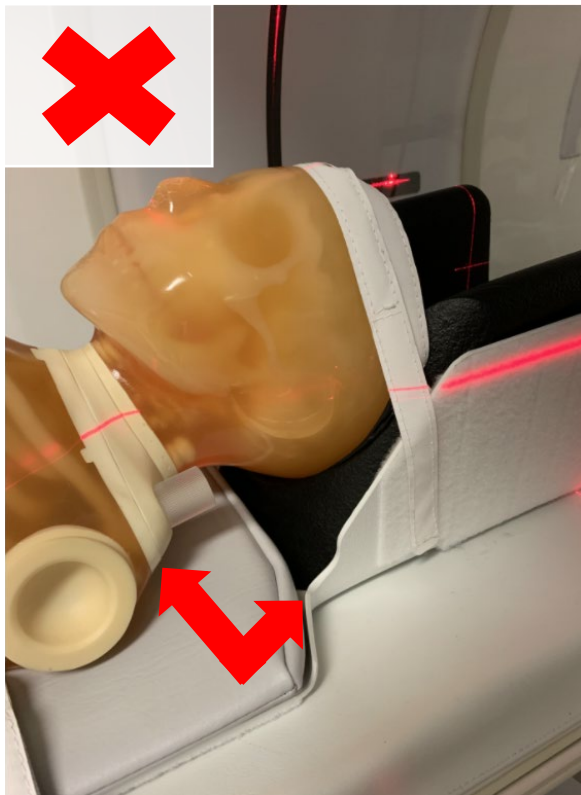

Почистване и дезинфекция

Почистете, като отстраните замърсяването, и дезинфекцирайте съгласно инструкциите на производителя/в съответствие с местните практики за почистване на околната среда в обекта, като използвате:

- Обикновена домашна белина - разредена 10:1 (минимално време за дезинфекция 5 минути)
- Бели кърпички Sani-Cloth® от PDI
- Бели бактерицидни кърпички от Clorox Healthcare®
- Спрей за почистване с белина от Clorox Healthcare®
- Почистващи дезинфекциращи кърпички с водороден пероксид от Clorox Healthcare®
- Почистващ препарат за различни повърхности с белина на Clorox®
- Разтвор за бактерицидно избелване Micro-Kill Bleach от Medline
- Кърпички за бактерицидно избелване Micro-Kill Bleach от Medline



Предупреждение! ВИНАГИ изплаквайте продуктите с чиста вода, за да отстраните остатъците от почистващия/дезинфекциращия разтвор. Ако не го направите, това може да доведе до нараняване на пациента.